

LAK-821HF GELUIDSCHAKELAAR

De geluidschakelaar LAK821 is ontworpen voor patiënten en personeel om te alarmeren in een situatie waarin de persoon niet op een andere manier actief kan alarmeren.


De LAK821 kan ingesteld worden tot zeer gevoelig met een direct alarm.

Het benodigde geluidsniveau kan gereguleerd worden met knop (5). Helemaal naar links gedraaid is de gevoeligheid minimaal helemaal naar rechts gedraaid maximaal. Knop (2) reguleert hoe lang het geluidsniveau moet aanhouden, voordat het alarm actief wordt.

Pas als het geluidsniveau dat ingesteld is met knop (5) bereikt is, wordt het alarm verzonden. De gewenste tijdvertraging kan ingesteld worden van 0 tot 7 seconden.

90 seconden nadat een alarm werd verzonden, is het apparaat klaar om een nieuw alarm te verzenden.

-  Geluidssensor
-  Tijdvertraging
-  Alarm LED-lampje
-  Resetknop
-  Niveauregulering
-  Sensor LED-lampje

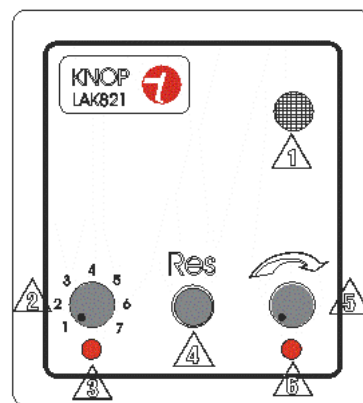

Artikelnummer:

KNO-LAK-01 Geluidschakelaar met zender

