

## GLASSOUSE

### 'bril'aanwijzer

GlassOuse is ontworpen voor mensen die sommige technologie niet kunnen gebruiken door een bedienbeperking, zodat ze (meer) controle krijgen over hun computers, telefoons en smart-tv's. GlassOuse wordt gedragen als een gewone bril en heeft velen geholpen bij het dagelijks gebruik van computers, telefoons, tablets en Smart TV's.



GlassOuse is een speciale muis die een alternatief is voor wie problemen hebben hun gadgets met andere invoerapparaten te gebruiken. Net als een bluetooth-muis met ingebouwde bewegingssensor is GlassOuse ontworpen om de cursor te bedienen met lichte bewegingen van het hoofd, met grote nauwkeurigheid. De gebruiker kan klikken door te bijten of met de lippen te drukken op een blauwe "bijtklik" -knop in de eerste versie.

De GlassOuse biedt een groot aantal schakelopties zodat het naar behoefte kan worden gebruikt als hulpmiddel. Er zijn verschillende schakelopties, zodat de GlassOuse op verschillende manier kan worden gebruikt, al naar gelang de mogelijkheden en wensen van de gebruiker. Hierdoor kunnen verschillende patiëntengroepen het apparaat op een effectieve manier gebruiken.

G-Switch-serie biedt drie opties als bijtschakelaar, blaasschakelaar en vingerschakelaar. Alle schakelopties worden geleverd met een mono 3,5 mm-jack.

### Bijtschakelaar



De bijtschakelaar is duurzaam en stabiel. Het is 100.000 keer getest onder een druk van 3 ton, zodat het lang mee gaat bij dagelijks gebruik. Met zijn flexibele kabel kunnen gebruikers de stand van de schakelaar aanpassen aan hun gebruik. Een waterdichte siliconen hoes beschermt het schakeldeel.

### Blaasschakelaar



In tegenstelling tot de meeste zuig- en blaassystemen heeft de Blaasschakelaar van de G-Switch-serie een elektronisch systeem waardoor de gebruiker met een klein pufje kan klikken. De ingebouwde microfoon van Blaasschakelaar werkt met een knoopcelbatterij en zet de frequenties die bij het blazen of puffen



ontstaan om in signalen om de kliks te doen. Het slimme batterijsysteem van de schakelaar schakelt het apparaat uit als het 3 uur niet wordt gebruikt. Het vervangen van de batterij is net zo eenvoudig als het verwisselen van de batterijen van uw afstandsbediening.

### Vingerschakelaar



De Vingerschakelaar wordt geleverd met een zeer gevoelige schakelknop die met zijn klevende onderzijde kan worden bevestigd op strook klittenband of op een ander materiaal en zijn gebruiker in staat stelt te klikken met elk deel van het lichaam. Dankzij zijn lange kabel kan de Vingerschakelaar op verschillende plekken op het lichaam worden gebruikt - met de vinger, met de arm en zelfs met het hoofd. Wikkel eenvoudig het klittenband om en plak het vast. Best handig.

#### Artikelnummer:

<b>ENN-V.1.2</b>	GlassOuse V.1.2
<b>ENN-GS01</b>	GlassOuse bijtschakelaar
<b>ENN-GS02</b>	GlassOuse blaasschakelaar
<b>ENN-GS03</b>	GlassOuse vingerschakelaar